

Forholdsregler ved indsamling:

UNDLAD at spise, drikke, ryge eller tygge tyggegummi i 30 minutter inden afgivelse af spytpøven.

Fjern IKKE plastfilmen fra tragtens låg.

Tilsigtet anvendelse: Til indsamling af menneskelig DNA fra spytpøve.

Indhold: Sættet indeholder stabiliserende væske.

Advarsler og forholdsregler: Skyl med vand hvis den stabiliserende væske kommer i kontakt med øjne eller hud. Må ikke indtages. Se Sikkerhedsdatablad på www.dnagenotek.com.






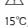




Lille hætte, kvælningsfare.

Opbevaring: 15°C / 30°C

Resumé og forklaring af sættet:


Oragene-DNA er et sæt til selv-indsamling, der leverer materialerne og vejledningen til at indsamle og stabilisere spytpøve.

Symbolforklaring:


	Se indlægsseddel
	Spyt skal opsamles inden (Anvendes inden)
	Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
	Katalognummer
	CE-mærkning
	Forsigtig, se brugsvejledningen
	Opbevaringsvejledning
	Autoriseret repræsentant
	Fabrikant
	Partinummer

Procedure:


De fleste personer er mellem 2 og 5 minutter om at komme med en spytpøve, når de følger trin 1 til 5.

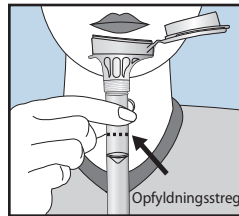


1 Spyt ind i tragtens indtil mængden af flydende spyt (uden bobler) når "opfyldningslinjen" vist på billede #1.

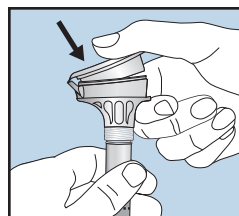


2 Hold røret lodret med en hånd. Luk låget med den anden hånd (som vist) ved at trykke fast ned på låget, indtil du hører et højt klik. Væsken i låget vil blive frigjort ind i røret og vil blande sig med spyttet. Sørg for, at låget er lukket tæt.

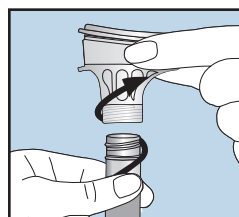

3 Hold røret lodret. Skru tragtens af røret.

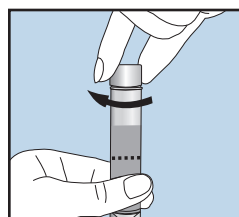

4 Brug den lille hætte til at lukke røret tæt til.

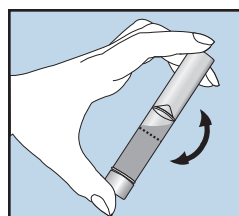

5 Ryst røret med hættens påsat i 5 sekunder. Kassér tragtens eller aflever den til genbrug.